

新感覚!

# 尿ケア革命

尿モレでお困りの方へ

- ✓ お仕事の時に
- ✓ ドライブやレジャーに
- ✓ 長時間トイレに  
いけない



快適



臭い



漏れ

日本製

漏れない!

柔らかく伸びる!

装着時の違和感0!

何度も溜められる!


TIMESHIFT®は、漏れた尿を製品本体に溜め、  
トイレで普段通りに用を足すように捨てることのできる  
**男性用尿ケア製品**です。

超軟性素材で装着の違和感なし

通常時(伸ばす前)



柔らかく伸びる!

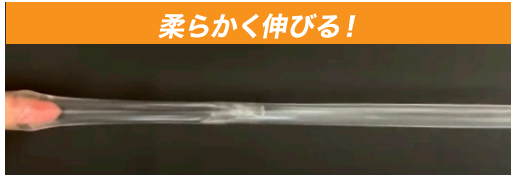

マシュマロよりも柔らかい



マシュマロの硬度=約5  
(ゴム硬度計Eタイプ)



当社素材  
=柔らかすぎて測定不能


柔らかい・伸びる・溜められる・逆止弁

当社製品は全体を硬度ゼロの材質で構成しており、違和感が少ないのが特徴です。  
生体内の構造からヒントを得た斬新な方法で機能設計・開発しております。  
下図は、人間の大腿静脈弁をヒントに開発した逆止弁です。


(i) 閉じた状態



(ii) 奥から手前の水流で開く弁

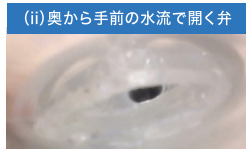

(iii) 再び閉じた状態

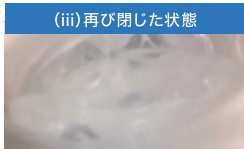

-着けたまま、簡単尿ケア-

一日のはじめに装着したら、定期的に尿を捨てるだけ。  
コックを開栓するだけで処理が可能です。



# ご使用方法




コック



リング



TIMESHIFT 本体

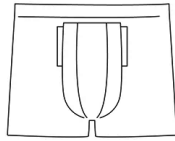


専用アンダーウェア


## 使用するもの

TIMESHIFTの装着には、本体と付属品の  
リング・コック、(立ち歩いてのご使用の場合は)  
専用アンダーウェアが必要です。


詳しい装着方法  
はこちら

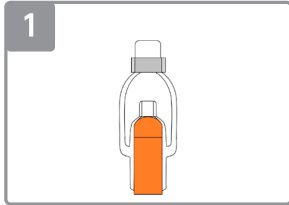


1  
マニュアルを読んで、正しく  
装着します。

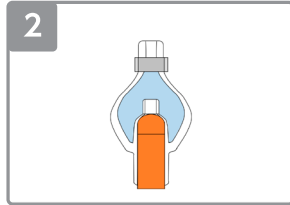

2  
製品に排尿します。  
溜められる量は、排尿2回分が  
目安です。  
※1回の排尿量150mlの場合

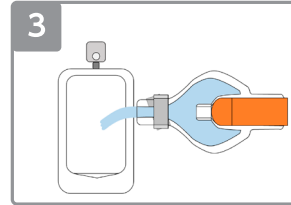

3  
装着したまま尿を排出します。  
空にした製品は繰り返し使用  
が可能です。  
使用開始から12時間程度で  
取り外してください。

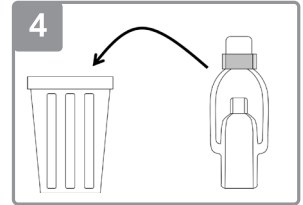

4  
取り外したら廃棄します。  
トイレに製品を流さないでくだ  
さい。

		商品名	JAN	品番	定価(税別)	ケース入数	JAN
TIMESHIFT (一般販売仕様版)		TIMESHIFT(標準)	4595555476012	TS-02M-STD	1,000	5×6箱 (30入)	
		TIMESHIFT(スリム)	4595555476029	TS-02M-SLM	1,000	5×6箱 (30入)	
専用 アンダーウェア		TIMESHIFT専用 アンダーウェア S (ウエストサイズ:68~76cm)	4549707496380	TS-UW-S	4,800	2枚入	
		TIMESHIFT専用 アンダーウェア M (ウエストサイズ:76~84cm)	4549707496397	TS-UW-M	4,800	2枚入	
		TIMESHIFT専用 アンダーウェア L (ウエストサイズ:84~94cm)	4549707496403	TS-UW-L	4,800	2枚入	
		TIMESHIFT専用 アンダーウェア LL (ウエストサイズ:94~104cm)	4549707496410	TS-UW-LL	4,800	2枚入	

## 本製品は介護の尿ケアにも使用できます

- 尿が皮膚にほとんど触れず清潔・快適
- オムツ交換の負担を大幅に軽減
- ゴミを大幅に削減

