


バッテリー収納の開け方/接続方法・電源ON/OFF

① シートを外しバッテリー収納カバーを開ける



レバーを下げながらシートを上へ抜く  
硬貨等で三か所のネジを外す

② バッテリーを2個設置し赤と黒の端子を接続し最後に車両側とバッテリー側のカプラーを繋げる  
注意1：バッテリーの接続時は赤端子から接続  
注意2：バッテリーの取外時は黒端子から外す

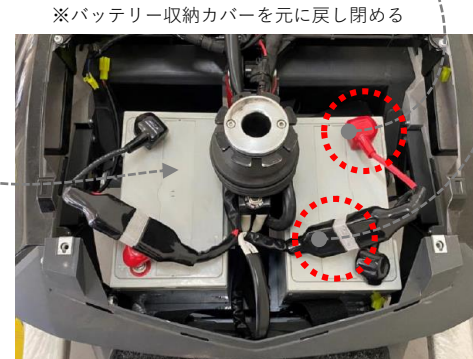


※バッテリー収納カバーを元に戻し閉める  
推奨：安全の為、バッテリー脱着作業は業者へご依頼ください

③ ロックレバー(電磁ブレーキ)の位置設定  
※レバー上向き(赤)フリーで手押し可能  
※レバー下向き(黒)ロックで手押し不可  
【走行前は必ずレバーを(黒)ロック状態にする】



※ロックレバーは左後輪の横にあります  
注意：ロックレバーがフリーの場合、モーターは作動しません(Powerエラー点滅)

④ 鍵を右に回し(時計回り)電源をON  
※電源ONでライトと電池残量の表示が点灯します  
※使用後は電源の消し忘れにご注意ください

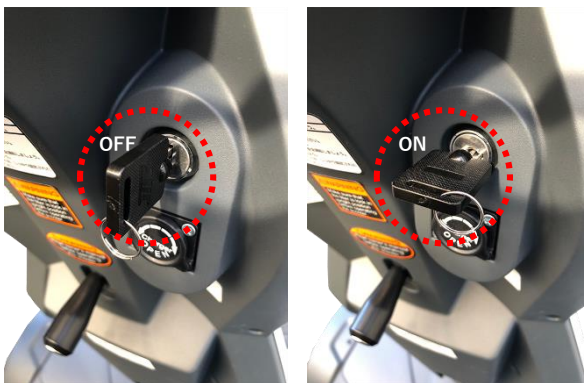

機能説明・運転方法：(速度モード&調整・操作方法)

- ① ウィンカー表示
- ② バッテリー残量表示
- ③ ライト点灯表示
- ④ ハザード ボタン
- ⑤ ウィンカー ボタン
- ⑥ 警報機 ボタン

速度モード設定スイッチ

- ⌚：低速モード(Low)
- ：高速モード(High)



速度調整ジョグ

- 低速モード
- 高速モード (最大16km/h)



黒レバーを人差し指で引いてバック 赤レバーを引いて前進  
※基本動作としてはアクセルレバーを人差し指で引く操作になります  
(レバーを離すと回生ブレーキがかかり車両は停止します)



各種調整：(ステアリング角度・シート位置・安全帯)

アジャスターレバーでハンドルの前後の調整  
※レバーを倒しながらハンドルの位置を調整してください



シート位置調整

- ① 背もたれ角度
- ② シート回転：360°
- ③ 前後移動



※シートは正面で固定された状態で運転してください

安全帯 (マジックテープ式)



充電方法：

充電口 (カバーを回して開きます)  
※充電は車両の充電口からしか行えません  
※家庭用コンセントで充電可能です  
※充電器を差し込む際はビンの向きを確認してください

